

Tube-Flexi

flexibel fixering för drän/kateter (REF 6028101 o REF 6058101 steril)



Indikation

Säker och flexibel fixering för kateter och dränage.
Tube-Flexi kan användas för slangar/tuber med CH8-18.

Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas enligt indikation ovan.
Produkten är avsedd att användas av utbildad vårdpersonal eller enligt instruktion från utbildad vårdpersonal.
Häftdynan mot huden kan inte omplaceras/flyttas.
Fixeringen för slag/tub kan lyftas och fixeras igen vid behov.

1. Rengör huden där häftdynan ska fästas. Huden ska vara torr vid fixering.
2. Öppna förpackningen genom att dela på flikarna i sidan och ta ut Tube-flexi.
3. Ta bort skyddsfilmerna på häftdynans undersida och fäst den mot huden.
4. Dra av skyddsfilmerna på remsans ovasida och placera slangen mitt på.
5. Vik flikarna av plast, mot varandra, över slangen, och förslut.
6. Fixeringen kan öppnas och fixeras igen vid behov.
7. När slangen ska bytas säras de två plastflikarna och en ny slang fixeras.
8. Häftdynan som sitter mot huden kan sitta kvar vid slangbyte.
Byte av häftdynan rekommenderas vid kontaminering.
9. När hela fixeringen ska tas bort: Börja med att ta bort slagen och därefter avlägsna häftdynan som sitter mot huden. Håll emot på omkringliggande hud när dynan lyfts bort för att minska obehag.

Tips vid fixering

Kontrollera att huden är torr

Använd inte mjukgörande kräm på huden där Tube-flexi ska fixeras

Kroppsbehåring, raka om möjligt

Håll en hand häftdynan för att värma/forma plattan innan slangen/tuben placeras

Tube-Flexi **KAN** sitta kvar på huden upp till 5 dagar eller tills dess adhesiva förmåga upphör.

*Observera att rekommendation om 5 dagar anger hur länge det är lämpligt att ha häftdynan på huden i samma placering, inte hur länge den **SKA** sitta. Upphör den adhesiva förmågan hos fixeringen tidigare finns det oftast en anledning – se nedan.*

Om Tube-flexi lossnat

Möjlig orsak	Åtgärd
Tube-flexi värmdes inte vid placering	Placera ny och värm med handen innan slag/tub anbringas
Patienten hud är kall vid fixering	Värm gärna huden genom att ex. lägga en varm handduk eller klädesplagg på fixeringsstället innan applicering
Patienten hud är fuktig	Torka huden där fixeringen ska sitta.
Tube-flexi har blivit kontaminerad	Rengör huden och placera ny häftdynan
Sår har uppstått under häftdynan	Flytta häftdynan till annan placering
Huden under Tube-flexi har macererat	Flytta häftdynan till annan placering
Åtkommande dusch och bad har förekommit	Skydda häftdynan vid bad och dusch med ex. plastpåse
Sjuv har uppstått	Kontrollera att slang/tub, kläder eller underlag inte skaver mot häftdynan
Patienten svettas onormalt mycket. Det är hög luftfuktighet. Fukt kan göra att häftdynans häftförmåga minskar.	Placera ny häftdyna
Tuben/slangen har fixerats över en rörlig kroppsdel ex. en led.	Flytta häftdynan till en "stum" placering
Mycket eller lång kroppsbehåring under häftdynan	Fäst häftdynan ex. på insidan av armen i stället för utsidan. Raka området under häftdynan

Manufacturer:
Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:
AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:
Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium