

Tvättset Nonwoven
10 tork, skål 500ml



| Ingående delar/material | Vikt | Färg |
|---|--------------------|-----------------------------|
| Nonwoven: 10 st tork, 50 mm i Ø Utvikt mått: 20 x 30 cm Viskos 70% Polyester 30% | 30g/m ² | Vit, utan optiskt blekmedel |
| Elastisk ring: Silikon | | |
| Skål: 100% polypropylen 500 ml - bruksfärdig | | Blå |

Produkten innehåller inte PVC.

| Förpackningar | Material | Avfallshantering* |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Innerförpackning IFP | medicinskt papper/plast | förbränning/mjukplast |
| Avdelningsförpackning AFP | kartong | kartong |
| Transportförpackning TFP | kartong | kartong |

Produkten uppfyller ISO standard SS-EN 1644-1 Provningsmetoder för kompresser av nonwoven-material för medicinskt bruk - Del 1: Nonwoven-material för tillverkning av kompresser

| Art.nr. | St/IFP | St/AFP | St/TFP | MBA |
|---------|--------|-------------|-------------|-----|
| 9150032 | 1 | 10 x 1 = 10 | 4 x 10 = 40 | TFP |

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Skål för uppsamling och mätning av olika vätskor inom operationsverksamhet eller där motsvarande behov finns. Rundtork för preoperativ tvätt eller annat behov av rengöring i samband med procedur.

Bruksanvisning





Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna innerförpackningen genom att dela på flikarna i sidan och ta ut innehållet med sterila handskar.
2. Använd steril pincett eller annat instrument för att hantera torken som ligger lös i skålen.
3. Fyll kärlet med tillämplig vätska och tvätta eller förvara efter behov.
4. Material kasseras efter användning i enlighet med instruktioner under avfallshantering.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

| | |
|---|---|
|  | Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014 |
|  | Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten |
|  | CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass Is, Notified Body: 0197 TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd |
|  | Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad. |

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

| | |
|---|---|
|  | Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart |
|  | Produkten innehåller inte naturlatex |

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:
Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:
AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC REP EC-REP:
Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium