

Kateteriseringset gasväv Stort



Ingående delar/material	Vikt	Färg
Gasväv: 100% bomull (17 trådar/cm ²) 5 st kompresser 7,5 x 7,5 cm, 8-lagers 5 st tork, 30-35 mm i Ø 3 st tork, 50 mm i Ø		Vit
Elastisk ring: Silikon		
Pincett: 2 st Polystyren, 128 mm		Grön
Handskar: 1 par Nitrilbutadien, puderfria, stl M, längd 30 cm		Vit
Rondskål: 1 st njurformad, Polystyren		Ljusblå
Skål: 1 st liten skål, Polystyren		Ljusblå
Duk: Papper/plast 60 x 75 cm	18g/m ² ; PE 29g/m ²	Vit/grön
Duk med slits: Papper/plast 60 x 75 cm slits på dukens kortsida, 27 cm lång, avslutas med hål 6 cm i Ø	18g/m ² ; PE 29g/m ²	Vit/grön
Omslagsduk: Papper/plast 60 x 60 cm	18g/m ² ; PE 29g/m ²	Vit/grön

Förpackningar	Material	Avfallshantering*
Innerförpackning IFP	medicinskt papper/plast	förbränning/mjukplast
Omslag handskar	medicinskt papper	förbränning
Avdelningsförpackning AFP	kartong	kartong
Transportförpackning TFP	kartong	kartong

Produkten uppfyller ISO standard SS-EN 14079 Medicintekniska produkter - Krav på egenskaper och provningsmetoder för absorberande gasväv av bomull och bomull/viskos och gasväv av rayon

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	St/IFP	St/AFP	St/TFP	ST/PALL	MBA
9150042	1	10 x 1 = 10	4 x 10 = 40	12 x 40 = 480	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Material passande för rengöring vid sättning och byte av kateter.

Bruksanvisning





Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna innerförpackningen genom att dela på flikarna i sidan och ta ut innehållet aseptiskt.
2. I förpackningen ingår ett par handskar stl M.
3. Agera i enlighet med instruktioner den kateter som ska hanteras och den metod som rekommenderas av kateterns tillverkare och lokala rutiner.
4. Använd bifogad pincett för att hantera tork/kompress som ligger löst i tråget.
5. Fyll vid behov kärlet med tillämplig vätska eller förvara instrument och material i dem.
6. Material kasseras efter användning i enlighet med instruktioner under avfallshantering.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass Is, Notified Body: 0197 TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium