


Omläggingsset gasväv plattork i tråg

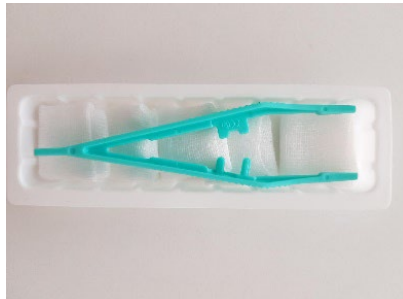

Ingående delar/material

		Färg
Gasväv:	100% bomull (17 trådar/cm ²) 5 st tork, 30 x 30 cm Utvikt mått: 12 x 15 cm	Vit
Pincett:	Polystyren, 128 mm	Grön
Tråg:	Polystyren, 2-delat, 150 x 45 x 18 mm	Vit

Förpackningar

Innerförpackning IFP
Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

medicinskt papper/plast
kartong
kartong

Avfallshantering*

förbränning/mjukplast
kartong
kartong

Produkten uppfyller ISO standard SS-EN 14079 Medicintekniska produkter - Krav på egenskaper och provningsmetoder för absorberande gasväv av bomull och bomull/viskos och gasväv av rayon

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
9151114	1	20 x 1 = 20	16 x 22 = 320	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Material passande för rengöring vid såromläggning och förbandsbyte.

Bruksanvisning





Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna innerförpackningen genom att dela på flikarna i sidan och ta ut innehållet med sterila handskar.
2. Använd bifogad pincett för att hantera tork/kompress som ligger löst i tråget.
3. Fyll vid behov kärlet med tillämplig vätska eller förvara instrument och material i dem.
4. Material kasseras efter användning i enlighet med instruktioner under avfallshandtering.


Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass Is, Notified Body: 0197 TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
[NATURAL LATEX FREE]	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium