

Tvättset nonwoven
20 tork, skål 1000ml



Ingående delar/material	Vikt	Färg
Nonwoven: 20 st tork, 60 mm i Ø Utvikt mått: 30 x 30 cm Viskos 70% Polyester 30%	30g/m ²	Vit, utan optiskt blekmedel
Elastisk ring: Silikon		
Skål: 100% polypropylen med gradering 1000 ml - bruksfärdig		Transparent

Produkten innehåller inte PVC.

Förpackningar	Material	Avfallshantering*
Innerförpackning IFP	medicinskt papper/plast	förbränning/mjukplast
Avdelningsförpackning AFP	kartong	kartong
Transportförpackning TFP	kartong	kartong

Produkten uppfyller ISO standard SS-EN 1644-1 Provningsmetoder för kompresser av nonwoven-material för medicinskt bruk - Del 1: Nonwoven-material för tillverkning av kompresser

Art.nr.	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
9158176	1	12 x 1 = 12	2 x 12 = 24	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Skål för uppsamling och mätning av olika vätskor inom operationsverksamhet eller där motsvarande behov finns. Rundtork för preoperativ tvätt eller annat behov av rengöring i samband med procedur.

Bruksanvisning





Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna innerförpackningen genom att dela på flikarna i sidan och ta ut innehållet med sterila handskar.
2. Använd steril pincett eller annat instrument för att hantera torken som ligger lös i skålen.
3. Fyll kärlet med tillämplig vätska och tvätta eller förvara efter behov.
4. Material kasseras efter användning i enlighet med instruktioner under avfallshantering.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass Is, Notified Body: 0197 TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt


Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt

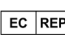


och ansluten till



 **Manufacturer:**
Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

 **Importer:**
AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

 **EC-REP:**
Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium