


Andningsskydd FFP3 NR med ventil

FFP3蝶型带阀/Filtering Half Mask (Model:MZC-1895)

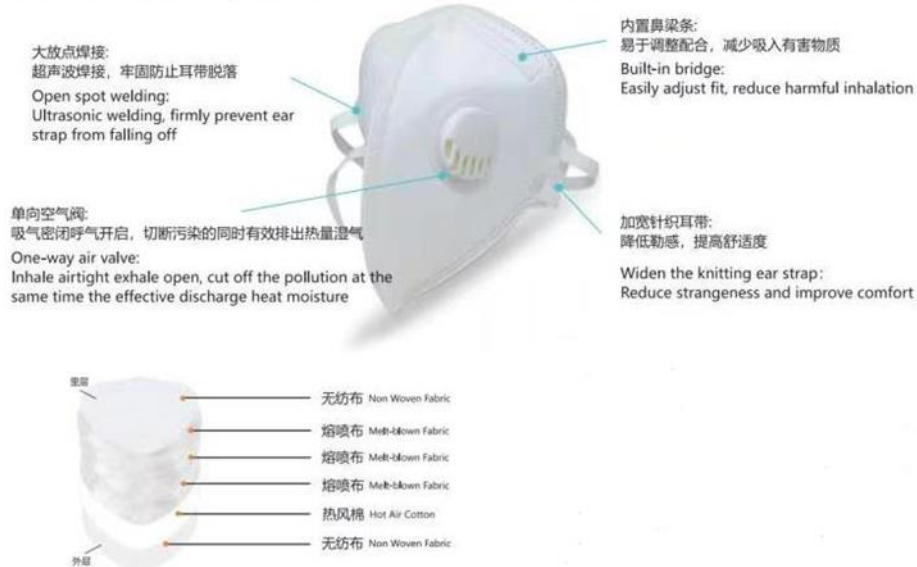

Ingående delar/ material

Färg

Material:	6 lager enligt ovan specifikation. 38% nonwoven cloth, 42% melt-blown fabric, 20% hot air cotton	Vit
Huvudband:	Spandex, Chinlon	Vit
Huvudband justering:	Syntetisk gummi	
Näsklämma:	2 galvaniserade stålwire, täckta med polyeten Bredd: 4 mm, längd: 9 mm	
Avlastning näsklämma:	polyuretanskum	
I enlighet med standard:	EN 149:2001 + A1:2009	
Förpackningar	Material	Avfallshantering*
Innerförpackning IFP	PE-påse	mjukplast
Avdelningsförpackning AFP	papp	kartong
Transportförpackning TFP	kartong TFC	kartong

Art.nr.	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
MZC-1895	1	24	20 x 24 = 480	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation: Andningsskydd. Maximal användningstid: 8–12 timmar.






Varningar

- Detta andningsskydd kan användas för filtrering av vissa icke-oljiga partiklar, t ex damm, pollen, aerosoler, icke-flyktig smog och andra luftföroreningar.
- Denna produkt kan ej användas för skyddsfiltrering av giftiga gaser och ångor.
- Om andningsskyddet är förorenat, skadat, åldrat, etc, måste det bytas ut mot ett nytt. Ej återanvändbar.



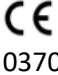


Bruksanvisning

- Håll andningsskyddet med näsklämman uppåt och dra ut huvudbanden.
- Placera andningsskyddet så att det täcker hela din näsa, mun och haka.
- Dra de två banden runt huvudet, en under och en ovanför öronen, och spänn sedan banden på baksidan av huvudet med bandklämmorna.
- Pressa näsbygeln från mitten av din näsa till sidorna med båda fingrarna.
- Justera andningsskyddets position så att det sluter tätt mot ditt ansikte.

	Det är nödvändigt att användaren läser bruksanvisningen
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. PPE-Regulation (EU) 2016/425; Anmält organ 0370: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, Spain.
	Förvaras torrt (> 50%)
	Temperaturgränser (0° - 50°C)

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex
	Internationell symbol för att kasta skräp

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Mezorison Health Science & Technology
(Shenzhen) Co., Ltd.,
No.12 Yuhe Road, Shiyan Town,
Baoan District, Shenzhen
China

Importer/EU-rep:

Amabilia Medical AB
Västra Särövägen 83
429 42 Särö
Sweden

Distributor:

AST Medical AB
Backa Bergö gata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se