


Andningsskydd FFP3 NR  
utan ventil

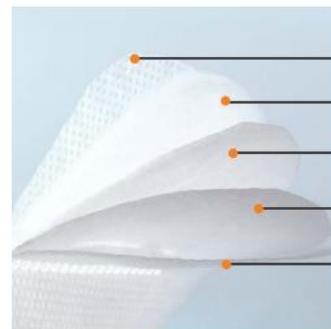

Non Woven Fabric  
Hot Air Cotton  
Melt-blown Fabric  
Melt-blown Fabric  
Non Woven Fabric

**Ingående delar/material**

**Färg**

**Material:** 5 lager enligt ovan specifikation.  
35% non-woven  
50% melt-blown fabric  
15% hot air cotton

Vit

**Huvudband:** Spandex, Chinlon  
**Huvudband justering:** Syntetisk gummi

Vit

**Näsklämma:** 2 galvaniserade ståltrådar, täckta med polyeten  
Bredd: 4 mm, längd: 90 mm  
**Avlastning näsklämma:** polyuretanskum

**I enlighet med standard:** EN 149:2001 + A1:2009

**Förpackningar**

Innerförpackning IFP  
Avdelningsförpackning AFP  
Transportförpackning TFP

**Material**

PE-påse  
papp  
kartong TFC

**Avfallshantering\***

mjukplast  
kartong  
kartong

| Art.nr.  | St/IFP | St/AFP | St/TFP        | MBA |
|----------|--------|--------|---------------|-----|
| MZC-1896 | 1      | 30     | 30 x 24 = 720 | TFP |

MBA = minsta beställningsbara enhet

**Indikation:** Andningsskydd. Maximal användningstid: 8–12 timmar.






### Varningar

- Detta andningsskydd kan användas för filtrering av vissa icke-oljiga partiklar, t ex damm, pollen, aerosoler, icke-flyktig smog och andra luftföroreningar.
- Denna produkt kan ej användas för skyddsfiltrering av giftiga gaser och ångor.
- Om andningsskyddet är förorenat, skadat, åldrat, etc, måste det bytas ut mot ett nytt. Ej återanvändbar.



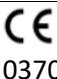


### Bruksanvisning

- Håll andningsskyddet med näsklämman uppåt och dra ut huvudbanden.
- Placera andningsskyddet så att det täcker hela din näsa, mun och haka.
- Dra de två banden runt huvudet, en under och en ovanför öronen, och spänn sedan banden på baksidan av huvudet med bandklämmorna.
- Pressa näsbygeln från mitten av din näsa till sidorna med båda fingrarna.
- Justera andningsskyddets position så att det sluter tätt mot ditt ansikte.

|   |   |
|---|---|
|  | Det är nödvändigt att användaren läser bruksanvisningen   |
|  | Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten |
|  | CE-märkt enl. PPE-Regulation (EU) 2016/425; Anmält organ 0370: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, Spain.  |
|  | Förvaras torrt (> 50%)  |
|  | Temperaturgränser (0° - 50°C)   |

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

|   |   |
|---|---|
|  | Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart |
|  | Produkten innehåller inte naturlatex            |
|  | Internationell symbol för att kasta skräp       |

### Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



#### Manufacturer:

Mezorison Health Science & Technology  
(Shenzhen) Co., Ltd.,  
No.12 Yuhe Road, Shiyan Town,  
Baoan District, Shenzhen  
China

#### Importer/EU-rep:

Amabilia Medical AB  
Västra Särövägen 83  
429 42 Särö  
Sweden

#### Distributor:

AST Medical AB  
Backa Bergö gata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)