

Bomullshandskar Standard oblekt



Ingående delar/material

Material: 100% bomull

Längd: 30 cm

Vikt

85g/m²

Färg

Naturvit/oblekt

Förpackningar

Innerförpackning IFP

Transportförpackning TFP

Material

PE-påse

kartong

Avfallshantering*

mjukplast

kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Storlek	Par/IFP	Par/TFP	MBA
1205	Small	10	30 x 10 = 300 par	TFP
1215	Medium	10	30 x 10 = 300 par	TFP
1225	Large	10	30 x 10 = 300 par	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Bomullshandskarna används till:

- Skydd för känsliga händer mot yttre påverkan (kyla, tidningssvärta, mynthantering)
- Skydda händer insmorda med salvor, så att salvan stannar kvar på händerna
- Underhandske till undersökningshandskar/skyddshandskar.


Bruksanvisning

1. Öppna innerförpackningen.
2. Ta ut två bomullshandskar. Alla handskar är lika. (ingen speciell utformning för höger/vänster hand)
3. Trä handsken på handen.
4. Kassera efter användning i enlighet med instruktioner under avfallshantering.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
---	---

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet. Tillverkning sker i Kina.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Ningbo Transo-Medical Co., Ltd.
Room 1608, No.18 Diamond Commercial plaza
No.409 jiang'an Road, Jiangbei District
Ningbo City, Zhejiang Province, P.R
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergö gata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se