

CVK-skydd komfort för bärare av central venkateter



Ingående delar/material		Vikt	Färg
Yttersida:	PP non-woven med karborrefixering	30g/m ²	Vit
Innersida:	Bomull	80g/m ²	Vit
	PP non-woven	30g/m ²	Vit
Mått:	Öppen: 31 x 22 cm, vikt: 15 x 22 cm		
Förpackningar	Material	Avfallshantering*	
Innerförpackning IFP	medicinskt papper/plast	förbränning/mjukplast	
Avdelningsförpackning AFP	kartong	kartong	
Transportförpackning TFP	kartong	kartong	

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
2258101	1	30 x 1 = 30	2 x 30 = 60	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Mjuk skyddande och absorberade material för att täcka och skydda centrala venkatetrar (CVK), dess slangar och kopplingar. Produkten är avsedd för att ge patienten en god komfort vid bärande av CVK.

Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna innerförpackningen genom att dela på flikarna i sidan och ta ut innehållet aseptiskt.
2. Agera i enlighet med instruktioner för den kateter som ska hanteras och den metod som rekommenderas av kateterns tillverkare och lokala rutiner.
3. Fyll i information om tid, datum och vem som utfört bytet på de förtyckta raderna på skyddet.
4. Fixera skyddet runt venkatetern och dess tillbehör.
5. Material kasseras efter användning i enlighet med instruktioner under avfallshantering.

Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass Is, Notified Body: 0197 TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium