

Elastisk binda
Form Fix, steril



Ingående delar/material

Vikt

Färg

Material: 100 % polyamid

ca 32 g/m²

Vit

Längd

osträckt: ca 4,2 m

utsträckt: ca 7,2 m

Elasticitet: ca 180%

Förpackningar

Innerförpackning IFP
Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

medicinskt papper/plast
ask med lock
kartong

Avfallshantering*

förbränning/mjukplast
kartong
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Storlek	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
3358121	4 cm x 7 m	1	10	8 x 10 = 80	TFP
3358122	6 cm x 7 m	1	10	8 x 10 = 80	TFP
3358123	8 cm x 7 m	1	10	8 x 10 = 80	TFP
3358124	10 cm x 7 m	1	10	8 x 10 = 80	TFP
3358125	12 cm x 7 m	1	10	8 x 10 = 80	TFP
3358126	15 cm x 7 m	1	10	8 x 10 = 80	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Engångsbinda för fixering, stöd och avlastning

Bruksanvisning




Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna genom att lyfta avdelningsförpackningens lock och ta ur en binda.
2. Fixera med önskad teknik.
3. Observera att bindan endast är steril vid första användningstillfället.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass Is
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium