

Hållare i metall för skyddsförkläde på rulle



Ingående delar/material

Material: 2 skänklar i metall

Skruv: 4 st

Plugg: 4 st i plast

Förpackningar

Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

påse (PE)
kartong

Avfallshantering*

mjukplast
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	St/AFP	St/TFP	MBA
5328101	1	50	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Hållare för skyddsförkläden förpackade på rulle, för montering på vägg.
Passar artikelnummer 8110 Zeus.

Bruksanvisning

För att montera hållaren krävs följande verktyg: bormaskin, anpassad till den vägg som hållaren ska fästas vid. Skruvmejsel eller skruvdragare för att skruva fast metallskänklarna.

1. Borra två hål i väggen med lämplig utrustning. Det ska vara 36 cm mellan centrum i hålen.
2. Sätt plugg i hålen och fäst metallskänklarnas övre del. Använd hålen i metallskänklarna för att få korrekt avstånd mellan de övre och nedre hålen. Borra ytterligare två hål för att fästa skänklarna nedre del. Dra åt alla skruvar.
3. På kartongens baksida finns två hål (med 36 cm mellanrum) som passar att trä över skänklarna.

Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium