

## Kompress nonwoven 2-pack 40g



### Ingående delar/material

**Nonwoven:** Viskos 70% Polyester 30%

### Vikt

40g/m<sup>2</sup>

### Färg

Vit, utan optiskt blekmedel

Produkten innehåller inte PVC.

Produkten uppfyller ISO standard SS-EN 1644-1 Provningsmetoder för kompresser av nonwoven-material för medicinskt bruk - Del 1: Nonwoven-material för tillverkning av kompresser

### Förpackningar

Innerförpackning IFP  
Avdelningsförpackning AFP  
Transportförpackning TFP

### Material

medicinskt papper/plast  
kartong  
kartong

### Avfallshantering\*

förbränning/mjukplast  
kartong  
kartong

\*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Stl cm	Utvikt stl. cm	Lager	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
2258111	5 x 5	10 x 10	4	2	50 x 2 = 100	18 x 100 = 1800	TFP
2258113	7,5 x 7,5	15 x 15	4	2	50 x 2 = 100	18 x 100 = 1800	TFP
2258115	10 x 10	20 x 20	4	2	50 x 2 = 100	18 x 100 = 1800	TFP
2258117	10 x 20	20 x 40	4	2	50 x 2 = 100	18 x 100 = 1800	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

### Indikation

Mjuka kompresser med hög absorption som används vid sårrengöring och omläggning.

### Bruksanvisning





Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna avdelningsförpackningen genom att trycka in perforeringen i förpackningens nederkant eller öppna kartongen upptill.
2. Använd rena händer/handskar för att ta ut en innerförpackning.
3. Öppna innerförpackningen och ta ut innehållet med handskar eller pincett.
4. Kompressen kan vid behov klippas utan risk för ludd.



### Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass Is, Notified Body: 0197 TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

### Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



**Manufacturer:**  
Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd  
Paojiang Industrial Zone  
Shaoxing, Zhejiang  
China

**Importer:**  
AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)

**EC REP EC-REP:**  
Obelis S.A.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels  
Belgium