

Kompress nonwoven  
5-pack 40g



Ingående delar/material	Vikt	Färg
<b>Non-woven:</b> Viskos 70% Polyester 30%	40g/m <sup>2</sup>	Vit, utan optiskt blekmedel

Produkten innehåller inte PVC.

Produkten uppfyller ISO standard SS-EN 1644-1 Provningsmetoder för kompresser av non-woven-material för medicinskt bruk - Del 1: Non-woven-material för tillverkning av kompresser

Förpackningar	Material	Avfallshantering*
Innerförpackning IFP	medicinskt papper/plast	förbränning/mjukplast
Avdelningsförpackning AFP	kartong	kartong
Transportförpackning TFP	kartong	kartong

\*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Stl cm	Utvikt stl. cm	Lager	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
2258112	5 x 5	10 x 10	4	5	25 x 5 = 125	18 x 125 = 2250	TFP
2258114	7,5 x 7,5	15 x 15	4	5	25 x 5 = 125	18 x 125 = 2250	TFP
2258116	10 x 10	20 x 20	4	5	25 x 5 = 125	18 x 125 = 2250	TFP
2258118	10 x 20	20 x 40	4	5	25 x 5 = 125	18 x 125 = 2250	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

### Indikation

Mjuka kompresser med hög absorption som används vid sårrengöring och omläggning.

### Bruksanvisning





Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna avdelningsförpackningen genom att trycka in perforeringen i förpackningens nederkant eller öppna kartongen upptill.
2. Använd rena händer/handskar för att ta ut en innerförpackning.
3. Öppna innerförpackningen och ta ut innehållet med handskar eller pincett.
4. Kompressen kan vid behov klippas utan risk för ludd.



### Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass Is, Notified Body: 0197 TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

### Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



#### Manufacturer:

Ningbo Transo-medical Co., Ltd  
Room 1608, No.18 Diamond commercial plaza  
No.409 Jiang'an Road, Jiangbei District  
Ningbo 315021, China

#### Importer:

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)

#### EC-REP:

Caretechion GmbH  
Niederrheinstr. 71  
40474 Düsseldorf  
Germany