

## Kompress non-woven Höggradigt ren, i ask, 30g



### Ingående delar/material

### Vikt

### Färg

**Non-woven:** Viskos 70% Polyester 30%  
Absorptionskapacitet 330g/m<sup>2</sup>      30g/m<sup>2</sup>      Vit, utan optiskt blekmedel

**Sterilisering:** Produkten har genomgått en pre-sterilisering i EO.  
Produkten kan steriliseras i EO eller i ångautoklav vid 135°C

Produkten innehåller inte PVC.

Produkten uppfyller ISO standard SS-EN 1644-1 Provningsmetoder för kompresser av non-woven-material för medicinskt bruk - Del 1: Non-woven-material för tillverkning av kompresser

### Förpackningar

### Material

### Avfallshantering\*

Avdelningsförpackning AFP  
Transportförpackning TFP

kartong  
kartong

kartong  
kartong

\*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Stl cm	Utvikt stl. cm	Lager	Abs-volym ml	St/AFP	St/TFP	MBA
2220001	5 x 5	10 x 10	4	3,3	150	90 x 150 = 13500	TFP
2220002	7,5 x 7,5	15 x 15	4	7,4	150	60 x 150 = 9000	TFP
2220003	10 x 10	20 x 20	4	13,2	150	60 x 150 = 9000	TFP
2220004	10 x 20	20 x 40	4	26,4	75	20 x 75 = 1500	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

### Indikation

Kompressen ska användas vid sårrengöring och omläggning.

### Bruksanvisning



Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna genom att pressa ut innerlådan vid askens ena kortsida, trycker bara ut så mycket att du ser en rad kompresser, anledningen är att kvarvarande kompresser inte ska exponeras utan hålla sig så rena som möjligt.
2. Använd pincett för att ta ut kompresserna ur asken.
3. Stäng asken när de kompresser som behövs tagits ut.



### Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDR (EU) 2017/745 klass I

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

### Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



#### Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd  
Paojiang Industrial Zone  
Shaoxing, Zhejiang  
China

#### Importer:

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)

#### EC-REP:

Obelis S.A.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels  
Belgium