

Kompress ej vidhäftande non-woven
1-pack, steril



| Ingående delar/material | Vikt | Färg |
|---|-----------------------|-----------------------------|
| Non-woven: Viskos 70% Polyester 30% | 250g/m ² | Vit, utan optiskt blekmedel |
| Ytskikt: Semipermeabel polyesterfilm | 18-20g/m ² | Vit |
| Absorption: Enligt SS-EN 13761:1. 3:3 2002: $\geq 0,20\text{g}/\text{cm}^2/24\text{h}$ | | |

Produkten innehåller inte PVC eller latex.

Produkten uppfyller ISO standard SS-EN 1644-1 Provningsmetoder för kompresser av non-woven-material för medicinskt bruk - Del 1: Non-woven-material för tillverkning av kompresser

| Förpackningar | Material | Avfallshantering* |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Innerförpackning IFP | medicinskt papper/plast | förbränning/mjukplast |
| Avdelningsförpackning AFP | kartong | kartong |
| Transportförpackning TFP | kartong | kartong |

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

| Art.nr. | Stl cm | Absorption enl. SS-EN 13726-1 | St/IFP | St/AFP | St/TFP | MBA |
|---------|---------|-------------------------------|--------|-------------|---------------|-----|
| 2290001 | 5 x 5 | 3,4 ml/st | 1 | 50 x 1 = 50 | 12 x 50 = 600 | TFP |
| 2298101 | 5 x 7,5 | 5,1 ml/st | 1 | 50 x 1 = 50 | 12 x 50 = 600 | TFP |
| 2290005 | 10 x 10 | 13,6 ml/st | 1 | 50 x 1 = 50 | 12 x 50 = 600 | TFP |
| 2290006 | 10 x 20 | 27,2 ml/st | 1 | 25 x 1 = 25 | 12 x 25 = 300 | TFP |
| 2290007 | 20 x 30 | 81,6 ml/st | 1 | 10 x 1 = 10 | 12 x 10 = 120 | TFP |

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Torra till lätt vätskande, rena sår av olika slag. Sårvätskan transporteras via polyesterfilmen och stannar kvar i det absorberande materialet. Produkten har hög absorptionsförmåga och kan fungera som fuktspärr.

Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.





Utförlig användarinstruktion/bruksanvisning finns bifogat i varje avdelningsförpackning.

1. Öppna avdelningsförpackningen genom att öppna kartongen upptill.
2. Använd rena händer/handskar för att ta ut en innerförpackning.
3. Öppna innerförpackningen och ta ut innehållet med handskar eller pincett.
4. Kompressen kan vid behov klippas och formas.
5. Båda sidor har samma typ av ytskikt, spelar ingen roll vilken sida som ligger mot sårytan.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

| | |
|---|---|
|  | Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014 |
|  | Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten |
|  | CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass Is, Notified Body: 0197 TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd |
|  | Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad. |

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

| | |
|---|---|
|  | Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart |
|  | Produkten innehåller inte naturlatex |

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium