

Kompress gasväv 5-pack, steril



Ingående delar/material

Gasväv: 100% bomull, peroxidblekt (17 trådar/cm²)
Absorptionskapacitet ca. 200g/m²

Färg

Vit

Produkten innehåller inte PVC eller latex.

Förpackningen kan öppnas uppfifrån, alternativt från ena gaveln. (se nedan)

Förpackningar

Innerförpackning IFP
Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

medicinskt papper/plast
kartong
kartong

Avfallshantering*

förbränning/mjukplast
kartong
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Produkten uppfyller ISO standard SS-EN 14079 Medicintekniska produkter - Krav på egenskaper och provningsmetoder för absorberande gasväv av bomull och bomull/viskos och gasväv av rayon

Art.nr.	Stl cm	Lager	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
1250002*	5 x 5	8	5	25 x 5 = 125	20 x 125 = 2500	TFP
1258112	5 x 5	12	5	25 x 5 = 125	18 x 125 = 2250	TFP
1258104	7,5 x 7,5	8	5	12 x 5 = 60	30 x 60 = 1800	TFP
1250004*	7,5 x 7,5	8	5	25 x 5 = 125	20 x 125 = 2500	TFP
1258113	7,5 x 7,5	12	5	25 x 5 = 125	18 x 125 = 2250	TFP
1258106	10 x 10	8	5	12 x 5 = 60	30 x 60 = 1800	TFP
1250006*	10 x 10	8	5	25 x 5 = 125	18 x 125 = 2250	TFP
1250008*	10 x 20	12	5	8 x 5 = 40	18 x 40 = 720	TFP
1258110	10 x 10	12	5	12 x 5 = 60	30 x 60 = 1800	TFP
1250010*	10 x 10	12	5	25 x 5 = 125	18 x 125 = 2250	TFP
1258118	10 x 60	8	5	12 x 5 = 60	8 x 60 = 480	TFP
1258119	20 x 80	8	5	6 x 5 = 30	8 x 30 = 240	TFP

*kan öppnas på gaveln

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Kompressen används vid sårrengöring och omläggning. Inga kända kontraindikationer.

Bruksanvisning





Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna avdelningsförpackningen genom att trycka in perforeringen i förpackningens nederkant eller öppna kartongen upptill.
2. Använd rena händer/handskar för att ta ut en innerförpackning.
3. Öppna innerförpackningen och ta ut innehållet med handskar eller pincett.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass Is, Notified Body: 0197 TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium