

Kompress gasväv renförpackad



Ingående delar/material

Färg

Gasväv: 100% bomull, peroxidblekt (17 trådar/cm²)
Absorptionskapacitet ca. 200g/m²

Vit

Sterilisering: Produkten kan steriliseras i EO eller i ångautoklav vid 135°C

Produkten innehåller inte PVC.

Förpackningar

Material

Avfallhantering*

Avdelningsförpackning AFP

kartong

kartong

Transportförpackning TFP

kartong

kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Produkten uppfyller ISO standard SS-EN 14079 Medicintekniska produkter - Krav på egenskaper och provningsmetoder för absorberande gasväv av bomull och bomull/viskos och gasväv av rayon

Art.nr.	Stl cm	Utvikt stl. cm	Lager	Abs-volym ml	St/AFP	St/TFP	MBA
1228101	5 x 5	10 x 20	8	4,0	120	90 x 120 = 10800	TFP
1228102	7,5 x 7,5	15 x 30	8	9,0	120	60 x 120 = 7200	TFP
1228103	10 x 10	20 x 40	8	16,1	120	60 x 120 = 7200	TFP
1228104	10 x 20	64 x 40	12	51,4	50	20 x 50 = 1000	TFP
1228105	10 x 10	30 x 40	12	24,0	100	20 x 100 = 2000	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Kompressen ska användas vid sårrengöring och omläggning.

Bruksanvisning



Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna genom att pressa ut innerlådan vid askens ena kortsida, trycker bara ut så mycket att du ser en rad kompresser, anledningen är att kvarvarande kompresser inte ska exponeras utan hålla sig så rena som möjligt.
2. Använd pincett för att ta ut kompresserna ur asken.
3. Stäng asken när de kompresser som behövs tagits ut.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDR (EU) 2071/745 klass I (DoC YB-33-01 Gauze swabs&balls&rolls)

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium