

## Kompress gasväv skuren, ovikt, höggradigt ren



### Ingående delar/material

**Gasväv:** 100% bomull, peroxidblekt (17 trådar/cm<sup>2</sup>)

**Steriliserbar:** Kan steriliseras i EO och ånga 135°C

Produkten innehåller inte PVC.

### Färg

Vit

### Förpackningar

Avdelningsförpackning AFP  
Transportförpackning TFP

### Material

papper  
kartong

### Avfallshantering\*

papper  
kartong

\*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Produkten uppfyller ISO standard SS-EN 14079 Medicintekniska produkter - Krav på egenskaper och provningsmetoder för absorberande gasväv av bomull och bomull/viskos och gasväv av rayon

Art.nr.	Stl cm	Lager	St/AFP	St/TFP	MBA
1200001	15 x 15	1	500	20 x 500 = 10000	TFP
1200002	20 x 20	1	500	20 x 500 = 10000	TFP
1200003	30 x 30	1	500	10 x 500 = 5000	TFP
1200004	40 x 40	1	500	8 x 500 = 4000	TFP
1200005	50 x 50	1	250	10 x 250 = 2500	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

### Indikation

Kompressen användas vid sårrengöring och omläggning. Inga kända kontraindikationer.

### Bruksanvisning





Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna avdelningsförpackningen genom att vika upp pappersförpackningen.
2. Använd rena händer/handskar för att ta ut en innerförpackning.
3. Öppna innerförpackningen och ta ut innehållet med handskar eller pincett.
4. Förslut förpackningen omgående för att förhindra att kvarvarande kompresser kontamineras.



### Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014. Kortare processtid.
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDR (EU) 2017/745 klass I (DoC YB-33-01 Gauze swabs&balls&rolls)
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

### Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



#### Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd  
Paojiang Industrial Zone  
Shaoxing, Zhejiang  
China

#### Importer:

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)

#### EC-REP:

Obelis S.A.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels  
Belgium