

Munskydd med knytband

Splash Plus 3-lagers Typ IIR



Ingående delar/material	Vikt	Färg
Ytterlager: PPSB (Spunbond)	20g/m ²	Grön
Filterlager: PP (Meltblown)	25g/m ²	Vit
Innerlager: PPSB (Spunbond)	20g/m ²	Vit
Knytband: PPSB (Spunbond)	35g/m ²	Vit
Längd: 40 cm		
Näsklämma: Galvaniserad ståltråd täckt med 0,6 mm polyeten. Längd: 12,5 cm ± 0,5 cm		

Produkten innehåller inte PVC eller glasfiber.

Storlek: 17,8 x 9,5 cm; utdraget mått 17,8 X 18,7 cm

Förpackningar	Material	Avfallhantering*
Avdelningsförpackning AFP	kartong	kartong
Transportförpackning TFP	kartong	kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Produkten uppfyller standard SS-EN 14683:2019 + AC:2019 Operationsmunskydd Krav och provningsmetoder.

BFE (Bacterial Filtration Efficiency) Bakterietäthet			
Krav enl. SS-EN 14683	≥ 98%		
Produkts testvärde	Genomsnitt	Min. värde	Max. värde
	≥ 99,8%	≥ 99,7%	≥ 99,9%
DELTA P Andningsmotstånd			
Krav enl. SS-EN 14683	< 60 Pa/cm ²		
Produkts testvärde	Genomsnitt	Min. värde	Max. värde
	47,6 Pa/cm ²	43,2 Pa/cm ²	55,6 Pa/cm ²
Vätskemotstånd			
Krav enl. SS-EN 14683	≥ 16 kPa		
Produkts testvärde	≥ 16 kPa		

Art.nr.	St/AFP	St/TFP	MBA
4128102	50	10 x 50 = 500	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Ett all round munskydd med knytband. Används på operationsavdelningar, intensivvårdsavdelningar och andra enheter där munskydd krävs och risk för vätskestänk föreligger.

Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna innerförpackningen genom att trycka in perforeringen på förpackningens ovansida.
2. Använd rena händer/handskar för att plocka ut innehållet. Munskydden ligger med utsidan uppåt.
3. Påtagning sker genom att ta tag i knytbanden och fixerar dem bakom huvudet. Fixera först det översta bandet. Var uppmärksam på att munskyddets utsida är grön och att näsklämman placeras uppåt.
4. Vidga därefter munskyddet genom att ta tag på mitten av långsidorna för att dra ut det så det passar över ansiktet.
5. Anpassa därefter näsklämman genom att forma den så att den sluter tätt kring näsans övre del.
6. Vid avtagning ska knytbanden lösgöras och i minsta möjliga mån ska munskyddet vidröras.

Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. (EU) MDR 2017/745 klass 1

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium