


## Munskydd med elastiska öronband Best Splash 3-lagers Typ IIR med anti-fog

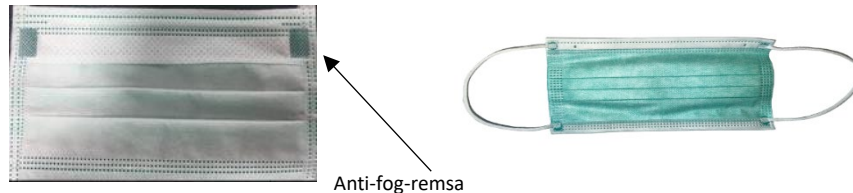

Ingående delar/material	Vikt	Färg
<b>Ytterlager:</b> PPSB (Spunbond)	34g/m <sup>2</sup>	Grön
<b>Filterlager:</b> PP (Meltblown)	25g/m <sup>2</sup>	Vit
<b>Innerlager:</b> PPSB (Spunbond)	14g/m <sup>2</sup>	Vit
<b>Anti-fog:</b> SMS non-woven	60g/m <sup>2</sup>	Vit
<b>Öronband:</b> Elastan (Polyester-polyuretan copolymer)		Vit
<b>Näsklämma:</b> Galvaniserad ståltråd täckt med 0,6 mm polyeten. Längd: 12,5 cm ± 0,5 cm		

Produkten innehåller inte PVC eller glasfiber.

**Storlek:** 17,8 x 9,5 cm; utdraget mått 17,8 X 18,7 cm

Förpackningar	Material	Avfallshantering*
Avdelningsförpackning AFP	kartong	kartong
Transportförpackning TFP	kartong	kartong

\*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Produkten uppfyller standard SS-EN 14683:2019 + AC:2019 Operationsmunskydd Krav och provningsmetoder.

<b>BFE (Bacterial Filtration Efficiency) Bakterietäthet</b>			
Krav enl. SS-EN 14683	<b>≥ 98%</b>		
Produktens testvärde	Genomsnitt	Min. värde	Max. värde
	≥ 99,9%	≥ 99,9%	≥ 99,9%
<b>DELTA P Andningsmotstånd</b>			
Krav enl. SS-EN 14683	<b>&lt; 60 Pa/cm<sup>2</sup></b>		
Produktens testvärde	Genomsnitt	Min. värde	Max. värde
	51,3 Pa/cm <sup>2</sup>	35,4 Pa/cm <sup>2</sup>	59,8 Pa/cm <sup>2</sup>
<b>Vätskemotstånd</b>			
Krav enl. SS-EN 14683	<b>≥ 16 kPa</b>		
Produktens testvärde	≥ 16 kPa		

Art.nr.	St/AFP	St/TFP	MBA
4128112	50	6 x 50 = 300	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

### Indikation

Ett all round munskydd med öronband. Används på operationsavdelningar, intensivvårdsavdelningar och andra enheter där munskydd krävs och risk för vätskestänk föreligger.

### Bruksanvisning




Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna innerförpackningen genom att trycka in perforeringen på förpackningens ovansida.
2. Använd rena händer/handskar för att plocka ut innehållet. Munskydden ligger med utsidan uppåt.
3. Påtagning sker genom att ta tag i öronbanden och fixerar dem runt öronen. Var uppmärksam på att munskyddets utsida är grön och att näsklämman placeras uppåt.
4. Vidga därefter munskyddet genom att ta tag på mitten av långsidorna för att dra ut det så det passar över ansiktet.
5. Anpassa därefter näsklämman genom att forma den så att den sluter tätt kring näsans övre del.
6. Vid avtagning ska öronbanden användas och i minsta möjliga mån ska munskyddet vidröras.



### Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Medicinteknisk produkt
	CE-märkt enl. MDR (EU) 2017/745 klass I
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

### Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



**Manufacturer:**  
Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd  
Paojiang Industrial Zone  
Shaoxing, Zhejiang  
China

**Importer:**  
AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)

**EC REP EC-REP:**  
Obelis S.A.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels  
Belgium