


Munskydd med knytband  
Antifog 3-lagers Typ IIR

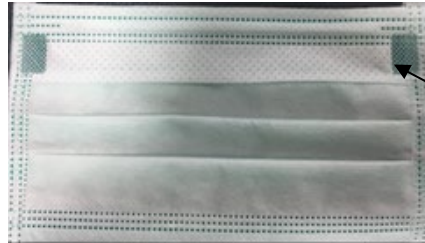

Antifog-remsa



**Ingående delar/material**

		<b>Vikt</b>	<b>Färg</b>
<b>Ytterlager:</b>	PP	30g/m <sup>2</sup>	Blå
<b>Filterlager:</b>	PP	25g/m <sup>2</sup>	Vit
<b>Innerlager:</b>	PP	20g/m <sup>2</sup>	Vit
<b>Antifog:</b>	SMS	60g/m <sup>2</sup>	Vit
<b>Knytband:</b>	PP	35g/m <sup>2</sup>	Vit
Längd: 40 cm x 10mm – 2 lager			

**Näsklämma:** Ståltråd täckt med PP. Längd: 13,5 cm ± 0,5 cm

Produkten innehåller inte PVC eller glasfiber.

**Storlek:** 17,5 x 9,5 cm; utdraget mått 17,5 X 16,5 cm

<b>Förpackningar</b>	<b>Material</b>	<b>Avfallshantering*</b>
Avdelningsförpackning AFP	kartong	kartong
Transportförpackning TFP	kartong	kartong

\*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Produkten uppfyller standard SS-EN 14683:2019 + AC:2019 Operationsmunskydd Krav och provningsmetoder.

<b>BFE (Bacterial Filtration Efficiency) Bakterietäthet</b>			
Krav enl. SS-EN 14683	≥ <b>98%</b>		
Produktens testvärde	Genomsnitt	Min. värde	Max. värde
	≥ 99,88%	≥ 99,8%	≥ 99,9%
<b>DELTA P Andningsmotstånd</b>			
Krav enl. SS-EN 14683	< <b>60 Pa/cm<sup>2</sup></b>		
Produktens testvärde	Genomsnitt	Min. värde	Max. värde
	54,2 Pa/cm <sup>2</sup>	50,2 Pa/cm <sup>2</sup>	57,0 Pa/cm <sup>2</sup>
<b>Vätskemotstånd</b>			
Krav enl. SS-EN 14683	≥ <b>16 kPa</b>		
Produktens testvärde	≥ 16 kPa		

Art.nr.	St/AFP	St/TFP	MBA
2035	50	10 x 50 = 500	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

### Indikation

Ett all round munskydd med knytband. Särskilt avsett för glasögonbärare. Används på operations- och intensivvårdsavdelningar och andra enheter där munskydd krävs och risk för vätskestänk föreligger.

### Bruksanvisning



Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna innerförpackningen genom att trycka in perforeringen på förpackningens ovansida.
2. Använd rena händer/handskar för att plocka ut innehållet. Munskydden ligger med utsidan uppåt.
3. Påtagning sker genom att ta tag i knytbanden och fixerar dem bakom huvudet. Fixera först det översta bandet. Var uppmärksam på att munskyddets utsida är grön och att näsklämman placeras uppåt.
4. Vidga därefter munskyddet genom att ta tag på mitten av långsidorna för att dra ut det så det passar över ansiktet.
5. Anpassa därefter näsklämman genom att forma den så att den sluter tätt kring näsans övre del.
6. Vid avtagning ska knytbanden lösgöras och i minsta möjliga mån ska munskyddet vidröras.



### Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass I

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

### Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till  **FÖRPACKNINGS & TIDNINGSSAMLINGEN**

#### Manufacturer:

Ningbo Transo-medical Co., Ltd  
Room 1608, No.18 Diamond commercial plaza  
No.409 Jiang'an Road, Jiangbei District  
Ningbo 315021, China

#### Importer:

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)

#### EC-REP:

Caretechion GmbH  
Niederrheinstr. 71  
40474 Düsseldorf  
Deutschland