

Munskydd med öronband
3-lagers Typ IIR



Ingående delar/material		Vikt	Färg
Ytterlager:	PP	30g/m ²	Blå
Filterlager:	PP	25g/m ²	Vit
Innerlager:	PP soft	20g/m ²	Vit
Öronband:	Spandex 30% Polyester 70%	18cm	Vit
Näsklämma:	Stål täckt med PP. Längd: 13,5 cm ± 0,5 cm		

Produkten innehåller inte PVC eller glasfiber.

Storlek: 17,5 x 9,5 cm

Förpackningar	Material	Avfallshantering*
Avdelningsförpackning AFP	kartong	kartong
Transportförpackning TFP	wellpapp	kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Produkten uppfyller standard SS-EN 14683:2019 + AC:2019 Operationsmunskydd Krav och provningsmetoder.

BFE (Bacterial Filtration Efficiency) Bakterietäthet			
Krav enl. SS-EN 14683	≥ 98%		
Produktens testvärde	Genomsnitt	Min. värde	Max. värde
	≥ 99,88%	≥ 99,8%	≥ 99,9%
DELTA P Andningsmotstånd			
Krav enl. SS-EN 14683	< 60 Pa/cm²		
Produktens testvärde	Genomsnitt	Min. värde	Max. värde
	54,2 Pa/cm ²	50,2 Pa/cm ²	57,0 Pa/cm ²
Vätskemotstånd			
Krav enl. SS-EN 14683	≥ 16 kPa		
Produktens testvärde	≥ 16 kPa		

Art.nr.	St/AFP	St/TFP	MBA
TM020421-B	50	10 x 50 = 500	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Ett all round munskydd med öronband. Används på operations- och intensivvårdsavdelningar och andra enheter där munskydd krävs och risk för vätskestänk föreligger.

Bruksanvisning




Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna innerförpackningen genom att trycka in perforeringen på förpackningens ovansida.
2. Använd rena händer/handskar för att plocka ut innehållet. Munskydden ligger med utsidan uppåt.
3. Påtagning sker genom att ta tag i öronbanden och fixerar dem bakom öronen.
Var uppmärksam på att munskyddets utsida är grön och att näsklämman placeras uppåt.
4. Vidga därefter munskyddet genom att ta tag på mitten av långsidorna för att dra ut det så det passar över ansiktet.
5. Anpassa därefter näsklämman genom att forma den så att den sluter tätt kring näsans övre del.
6. Vid avtagning ska knytbanden lösgöras och i minsta möjliga mån ska munskyddet vidröras.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Medicinteknisk produkt
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDR 2017/745 klass I

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2021

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till  **FTI** FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN

Manufacturer:

Ningbo Transo-medical Co., Ltd
Room 1608, No.18 Diamond commercial plaza
No.409 Jiang'an Road, Jiangbei District
Ningbo 315021, China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Caretechion GmbH
Niederrheinstr. 71
40474 Düsseldorf
Germany