


## Munskyddsfixering justerbar hållare för munskydd med öronband

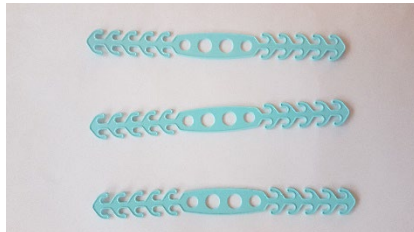

### Ingående delar/material

**Material:** Polypropylen

**Storlek:** 167x17mm

### Färg

Blandade pastellfärger

### Förpackningar

Avdelningsförpackning

Transportförpackning TFP

### Material

kartong

kartong

### Avfallshantering\*

kartong

kartong

\*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Mått	St/AFP	St/TFP	MBA
MS001-7	167x17mm	20	25 x 20 = 500	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

### Indikation

Flergångshållare för munskydd med öronband. Produkten syftar till att ge munskyddet en bättre passform. Då öronbanden vanligtvis endast tillverkas i en storlek kan det vara svårt att få en bra fixering för alla användare på grund av skillnader huvudstorlek. Med fixeringstillbehöret kan detta avhjälpas.

### Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas vid bärande av munskydd med öronband.

1. Fäst den ena sidan av plastfixeringen i munskyddets ena öronband.
2. Var noga med att endast röra vid öronbanden när du tar av och på munskyddet.
3. Placera munskyddet över nästa och mun.
4. Justera så att munskyddet sitter tätt över näsroten.
5. För plastfixeringen, som sitter i öronbandet, bakom huvudet och fixera även andra sidans öronband.
6. Kassera efter användning i enlighet med instruktioner under avfallshantering.

### Rengöring

Hållaren kan rengöras med alla rengöringsmetoder för att bekämpa virus.



### Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

### Tillverkning

Submeds processer är certifierade enligt EN ISO 13485:2016 & ISO 9001:2015

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

### Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet. Tillverkning sker i Turkiet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



### Manufacturer:

Submed – Su Biyomedikal Sistemler ve Saglik Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd.Sti  
Orhangazi Mah. 1673. Sok.  
No:20/2-3 Esenyurt, Istanbul  
Turkey  
[www.submed.com.tr](http://www.submed.com.tr)

### Distributor:

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)