


## Nasogas-Fix Kateter/sond fixering

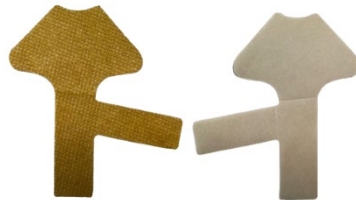

### Ingående delar/material

**Material:** Nonwoven  
Glasinpaper

### Färg

beige  
transparent

**Adhesiv:** Akrylatbaserad

### Förpackningar

Avdelningsförpackning AFP  
Transportförpackning TFP

### Material

ask med lock (ECF alt. TCF)  
kartong (ECF alt. TCF)

### Avfallshantering\*

kartong  
kartong

\*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Storlek	Mått cm	St/AFP	St/TFP	MBA
6028111	S	2,8 x 3,7	1 x 100 = 100	16 x 100 = 1600	TFP
6028112	M	7 x 7,6	1 x 100 = 100	16 x 100 = 1600	TFP
6028113	L	8 x 8,7	1 x 100 = 100	16 x 100 = 1600	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

### Indikation

Säker och flexibel fixering för syrgaskettrar, duodenal-och näringssond.

### Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.




1. Rengör huden
2. Öppna förpackningen
3. Ta bort skyddsfilm
4. Fixera Nasogas
5. Använd produkt kasseras i enlighet med avfallshantering.

Nasogas-Fix kan sitta kvar på huden upp till 5 dagar eller tills dess adhesiva förmåga upphör. Observera att rekommendation om 5 dagar anger hur länge det är lämpligt att ha häftdynan på huden i samma placering, inte hur länge den ska sitta.



### Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Medicinteknisk produkt
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDR (EU) 2017/745, klass I

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2021

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

### Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt




och ansluten till



 **Manufacturer:**  
Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd  
Paojiang Industrial Zone  
Shaoxing, Zhejiang  
China

 **Importer:**  
AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)

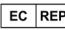 **EC-REP:**  
Obelis S.A.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels  
Belgium