

OP-rock Förstärkt inkl. 2 handdukar



Ingående delar/material

Tyg: SMMMS polypropylen (PP) 45g/m²
Antistatbehandlad och alkoholavvisande.

Färg

Blå

Förstärkning: Bröst och ärmar på rockens insida.

Blå

Mudd: Polyester/Bomull (Poly cotton)

Vit

Knytband: 3 st smala, längd 38 cm; 1 st brett, längd 68 cm

Blå

Handdukar: 2 st 30 x 40 cm av cellulosa

Förpackningar

Innerförpackning IFP
Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

papper/plast
kartong
kartong

Avfallshantering*

papper/mjukplast
kartong
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Stl	Längd cm	Vidd cm	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
9710	L	130	154	1	20 x 1 = 20	2 x 20 = 40	TFP
9715	XL	145	170	1	20 x 1 = 20	2 x 20 = 40	TFP
9720	XXL	150	184	1	20 x 1 = 20	2 x 20 = 40	TFP
9725	XXL-X-lång	159	184	1	20 x 1 = 20	2 x 20 = 40	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Sterila engångs operationsrockar används som skydd för läkare, patient och för att förhindra att mikroorganismer, partiklar och vätskor överförs från en operationssal till en annan. Detta minimerar risken av kontaminering under och mellan operation, pre- och post-op avdelningar. Operationsrockarna används antingen för att täcka kirurgen och upprätthålla en skyddsbarriär under operation, i hemsjukvård eller under patientnära procedurer.

Egenskaper: Extra förstärkning över bröst och armar.

Kontraindikation:

Använd inte förpackningen om den är öppnad eller skadad.
Re-sterilisera inte produkten.





Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal. Dessa rockar ska tas på med hjälp av korrekt aseptisk påtagningsteknik.



- Öppna förpackningen och ta ut produkten.
- Assistans krävs för att på ett aseptiskt sätt ta på rocken.
- Varje rock är försedd med en överräkningsbricka
Överräkningsbrickan används av assisterande personal för att inte de ska komma i kontakt med rockens material.

Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

	Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass I
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till  **FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN**

Manufacturer:

Amaryllis Healthcare Pvt. Ltd.,
Plot No: 112, Bommasandra Jigani Link Road
Ind. Area Bandenallasandra Village, Jigani Hobli,
Anekal Taluk Bangalore -560105, Karnataka
India

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Amstermed B.V.
Van der Burchstraat 28
2132 RN Hoofddorp
The Netherlands