

OP-rock Standard inkl. 1 handduk



Ingående delar/material

Tyg:	SMMMS polypropylen (PP) Antistatbehandlad och alkoholavvisande. Ultraljudssvetsade sömmar från axel till ankel och under ärm.	Vikt 45g/m ²	Färg Blå
Mudd:	Polyester/bomull (Poly cotton)		Vit
Knytbånd:	3 st smala, längd 38 cm; 1 st brett, längd 68 cm		Blå
Handdukar:	1 st 30 x 40 cm av cellulosa		Vit

Förpackningar	Material	Avfallshantering*
Innerförpackning IFP	påse papper/plast	papper/mjukplast
Avdelningsförpackning AFP	kartong	kartong
Transportförpackning TFP	kartong	kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Stl	Längd cm	Vidd cm	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
97105	M	130	145	1	25 x 1 = 25	2 x 25 = 50	TFP
97110	L	140	154	1	20 x 1 = 20	2 x 20 = 40	TFP
97115	XL	150	170	1	20 x 1 = 20	2 x 20 = 40	TFP
97120	XXL	160	184	1	18 x 1 = 18	2 x 18 = 36	TFP
97125	Lång XXL	170	184	1	18 x 1 = 18	2 x 18 = 36	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Sterila engångs operationsrockar används som skydd för läkare, patient och för att förhindra att mikroorganismer, partiklar och vätskor överförs från en operationssal till en annan. Detta minimerar risken av kontaminering under och mellan operation, pre- och post-op avdelningar. Operationsrockarna används för att täcka kirurgen och upprätthålla en skyddsbarriär under operation, i hemsjukvård eller under patientnära procedurer.

Kontraindikation:

Använd inte förpackningen om den är öppnad eller skadad.
Re-sterilisera inte produkten.

Bruksanvisning

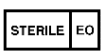



Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal. Dessa rockar ska tas på med hjälp av korrekt aseptisk påtagningsteknik.

- Öppna förpackningen och ta ut produkten.
- Assistans krävs för att på ett aseptiskt sätt ta på rocken.
- Varje rock är försedd med en överräkningsbricka
Överräkningsbrickan används av assisterande personal för att inte de ska komma i kontakt med rockens material.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 3 år från tillverkningsdatum.

	Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass Is
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Amaryllis Healthcare Pvt. Ltd.,
Plot No: 112, Bommasandra Jigani Link Road
Ind. Area Bandenallasandra Village, Jigani Hobli,
Anekal Taluk Bangalore -560105, Karnataka
India

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Amstermed B.V.
Van der Burchstraat 28
2132 RN Hoofddorp
The Netherlands