


## OP-rock Standard utan handduk

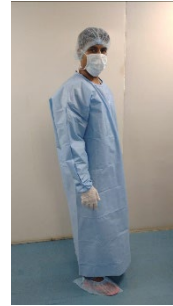

### Ingående delar/material

**Tyg:** SMMMS polypropylen (PP) 45g/m<sup>2</sup>  
Antistatbehandlad och alkoholavvisande.  
Ultraljudssvetsade sömmar från axel till ankel och under ärm.

### Färg

Blå

**Mudd:** Polyester/bomull (Poly cotton)

Vit

**Knytbånd:** 3 st smala, längd 38 cm; 1 st brett, längd 68 cm

Blå

### Förpackningar

Innerförpackning IFP  
Avdelningsförpackning AFP  
Transportförpackning TFP

### Material

påse papper/plast  
kartong  
kartong

### Avfallshantering\*

papper/mjukplast  
kartong  
kartong

\*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Stl	Längd cm	Vidd cm	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
97005	M	125	145	1	25 x 1 = 25	2 x 25 = 50	TFP
97010	L	136	154	1	20 x 1 = 20	2 x 20 = 40	TFP
97015	XL	146	170	1	20 x 1 = 20	2 x 20 = 40	TFP
97020	XXL	155	184	1	18 x 1 = 18	2 x 18 = 36	TFP
97025	Lång XXL	166	184	1	18 x 1 = 18	2 x 18 = 36	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

### Indikation

Sterila engångs operationsrockar används som skydd för läkare, patient och för att förhindra att mikroorganismer, partiklar och vätskor överförs från en operationssal till en annan. Detta minimerar risken av kontaminering under och mellan operation, pre- och post-op avdelningar. Operationsrockarna används för att täcka kirurgen och upprätthålla en skyddsbarriär under operation, i hemsjukvård eller under patientnära procedurer.

### Kontraindikation:

Använd inte förpackningen om den är öppnad eller skadad.  
Re-sterilisera inte produkten.

### Bruksanvisning





Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal. Dessa rockar ska tas på med hjälp av korrekt aseptisk påtagningsteknik.

- Öppna förpackningen och ta ut produkten.
- Assistans krävs för att på ett aseptiskt sätt ta på rocken.
- Varje rock är försedd med en överräkningsbricka  
Överräkningsbrickan används av assisterande personal för att inte de ska komma i kontakt med rockens material.



### Lagring och hållbarhetstid

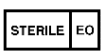Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 3 år från tillverkningsdatum.

	Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass Is
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

### Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



#### Manufacturer:

Amaryllis Healthcare Pvt. Ltd.,  
Plot No: 112, Bommasandra Jigani Link Road  
Ind. Area Bandenallasandra Village, Jigani Hobli,  
Anekal Taluk Bangalore -560105, Karnataka  
India

#### Importer:

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
www.astmedical.se

#### EC-REP:

Amstermed B.V.  
Van der Burchstraat 28  
2132 RN Hoofddorp  
The Netherlands