

Plåster på rulle
Non-woven



Ingående delar/material

Färg

Non-woven:

Viskos

Beige

Absorberande yta:

Viskos/polyester täckt med tunn polyuretanfilm Vit

Häftämne:

Akrylatbaserad häftmassa

Skyddspapper:

Medicinsk papper av cellulosa

Förpackningar

Innerförpackning IFP
Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

papp
kartong
kartong

Avfallshantering*

kartong
kartong
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Storlek	St/AFP	St/IFP	St/TFP	MBA
6010031	4 cm x 5 m	1	10	10 x 10 = 100	TFP
6010032	6 cm x 5 m	1	10	10 x 10 = 100	TFP
6010033	8 cm x 5 m	1	10	10 x 10 = 100	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Skydda skadad hud. Absorbera blod och sårexsudat. Förband för mindre sår och skrubbsår.

Bruksanvisning



Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna genom att trycka in perforeringen på avdelningsförpackningens kant.
2. Dra ut plåstret ur asken i önskad längd.
3. Klipp av plåstret.
4. Lossa skyddspapperet och placera plåstret över såret.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDR (EU) 2017/745 klass I

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium