

Plattork gasväv högradigt ren



Ingående delar/material

Gasväv: 100% bomull, peroxidblekt (17 trådar/cm²)

Färg

Vit

Sterilisering: Kan steriliseras i EO och ånga 135°C

Produkten innehåller inte PVC eller latex.

Förpackningen kan öppnas uppifrån, alternativt från ena gaveln.

Förpackningar

Innerförpackning IFP
Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

plastpåse
plastpåse
kartong

Avfallshantering*

mjukplast
mjukplast
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Produkten uppfyller ISO standard SS-EN 14079 Medicintekniska produkter - Krav på egenskaper och

Art.nr.	Stl mm	Utvikt stl cm	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
1410022	8 x 8	3 x 4	100	10 x 100 = 1000	10 x 1000 = 10000	TFP
1410023	16 x 16	6 x 8	100	10 x 100 = 1000	10 x 1000 = 10000	TFP
1410021	30 x 30	12 x 15	saknas	500	20 x 500 = 10000	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Torken används vid sårrengöring och omläggning. Inga kända kontraindikationer.

Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna avdelningsförpackningen genom sära på zip-förlutningen i påsen. För de mindre storlekarna finns ytterligare zip-påsar (som innerförpackning) inuti.
2. Använd rena händer/handskar för att ta ut en innerförpackning.
3. Öppna innerförpackningen och ta ut innehållet med handskar eller pincett.

Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014 (förkortad process)
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDR (EU) 2017/745 Klass I (DoC YB-33-01 Gauze swabs&balls&rolls)
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium