

**Rundtork non-woven**  
5-, 10-, 20-pack

**Ingående delar/material**
**Vikt**
**Färg**

**Non-woven:** Viskos 70% Polyester 30%      30g/m<sup>2</sup>      Vit, utan optiskt blekmedel  
Absorptionskapacitet ca. 330g/m<sup>2</sup>

**Elastisk ring:** Silikon

Produkten innehåller inte PVC eller latex.

Produkten uppfyller ISO standard SS-EN 1644-1 Provningsmetoder för kompresser av non-woven-material för medicinskt bruk - Del 1: Non-woven-material för tillverkning av kompresser

**Förpackningar**

Innerförpackning IFP  
Avdelningsförpackning AFP  
Transportförpackning TFP

**Material**

medicinskt papper/plast  
kartong  
kartong

**Avfallshantering\***

förbränning/mjukplast  
kartong  
kartong

\*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Kan öppnas upptill alternativt via perforering på ena gaveln.

Art.nr.	Stl Ø	Utvikt stl. cm	Abs- volym ml	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
2450003	30 mm	15 x 15	7,4	5	15 x 5 = 75	20 x 75 = 1500	TFP
2450007	35 mm	15 x 20	9,9	5	15 x 5 = 75	40 x 75 = 3000	TFP
2450004	40 mm	20 x 20	13,2	5	15 x 5 = 75	18 x 75 = 1350	TFP
2450008	45 mm	20 x 25	16,5	5	12 x 5 = 60	24 x 60 = 1440	TFP
2450005	50 mm	20 x 30	19,8	5	10 x 5 = 50	18 x 50 = 900	TFP
2458125 Dubbel-pack	50 mm	20 x 30	19,8	10	10 x 10 = 100	12 x 100 = 1200	TFP
2450006	60 mm	30 x 30	29,7	5	10 x 5 = 50	24 x 50 = 1200	TFP
2450029 Dubbel-pack	60 mm	30 x 30	29,7	10	10 x 10 = 100	12 x 100 = 1200	TFP
2458129 Dubbel-pack	60 mm	30 x 30	29,7	20	10 x 20 = 200	6 x 200 = 1200	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

### Indikation

Mjuka tork med hög absorption som används vid allmän sårrengöring, pre-operativ tvätt och omläggning. Inga kända kontraindikationer.

### Bruksanvisning





Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna avdelningsförpackningen genom att trycka in perforeringen i förpackningens nederkant eller öppna kartongen upptill.
2. Använd rena händer/handskar för att ta ut en innerförpackning.
3. Öppna innerförpackningen och ta ut innehållet med handskar eller pincett.



### Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass Is, Notified Body: 0197 TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

### Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



#### Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd  
Paojiang Industrial Zone  
Shaoxing, Zhejiang  
China

#### Importer:

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)

#### EC-REP:

Obelis S.A.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels  
Belgium