

Rundtork non-woven
100-pack, renförpackad



Ingående delar/material

Vikt

Färg

Non-woven: Viskos 70% Polyester 30% 30g/m² Vit, utan optiskt blekmedel

Elastisk ring: Silikon

Sterilisering: Produkten kan steriliseras i EO eller i ångautoklav vid 121°C alt. 135°C

Produkten innehåller inte PVC.

Produkten uppfyller ISO standard SS-EN 1644-1 Provningsmetoder för kompresser av non-woven-material för medicinskt bruk - Del 1: Non-woven-material för tillverkning av kompresser

Förpackningar

Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

påse (PE)
kartong

Avfallshantering*

mjukplast
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Stl Ø	Utvikt stl. cm	St/AFP	St/TFP	MBA
2418107	30 mm	15 x 15	100	25 x 100 = 2500	TFP
2418108	40 mm	20 x 20	100	25 x 100 = 2500	TFP
2418111	45 mm	20 x 25	100	24 x 100 = 2400	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Mjuka tork med hög absorption som används vid allmän sårrengöring och omläggning. Inga kända kontraindikationer.

Bruksanvisning



Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna genom att dra isär påsens zip-förslutning.
2. Använd pincett för att ta ut torken ur påsen.
3. Förslut påsen genast för att återstående tork ska hålla sig rena.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass I

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium