

Rundtork gasväv
5- och 10-pack, steril



Ingående delar/material

Färg

Gasväv: 100% bomull, peroxidblekt (17 trådar/cm²)
Absorptionskapacitet ca. 200g/m²

Vit

Elastisk ring: Silikon

Produkten innehåller inte PVC eller latex.

Förpackningen kan öppnas uppifrån, alternativt från ena gaveln.

Förpackningar

Innerförpackning IFP
Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

medicinskt papper/plast
kartong
kartong

Avfallshantering*

förbränning/mjukplast
kartong
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Stl Ø mm	Utvikt stl. cm	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
1450003	30	15 x 15	5	15 x 5 = 75	20 x 75 = 1500	TFP
1450004	40	20 x 20	5	15 x 5 = 75	18 x 75 = 1350	TFP
1450005	50	20 x 30	5	10 x 5 = 50	18 x 50 = 900	TFP
1450007	50	20 x 30	10	10 x 10 = 100	12 x 100 = 1200	TFP
1458107	50	20 x 30	10 dubbel-pack	10x 10 = 100	12 x 100 = 1200	TFP
1450006	60	30 x 40	5	10 x 5 = 50	24 x 50 = 1200	TFP
1458108	70	40 x 45	5	10 x 5 = 50	12 x 50 = 600	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Mjuka tork med hög absorption som används vid allmän sårrengöring, pre-operativ tvätt och omläggning. Inga kända kontraindikationer.

Bruksanvisning





Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna avdelningsförpackningen genom att trycka in perforeringen i förpackningens nederkant eller öppna kartongen upptill.
2. Använd rena händer/handskar för att ta ut en innerförpackning.
3. Öppna innerförpackningen och ta ut innehållet med handskar eller pincett.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass Is, Notified Body: 0197 TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium