

Rundtork gasväv
högradigt ren



Ingående delar/material

Färg

Gasväv: 100% bomull, peroxidblekt (17 trådar/cm²)
Absorptionskapacitet ca. 200g/m²

Vit

Elastisk ring: Silikon

Sterilisering: Kan steriliseras i EO eller ånga 135°C

Produkten innehåller inte PVC eller latex.

Förpackningar

Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

plastpåse
kartong

Avfallshantering*

mjukplast
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Produkten uppfyller ISO standard SS-EN 14079 Medicintekniska produkter - Krav på egenskaper och provningsmetoder för absorberande gasväv av bomull och bomull/viskos och gasväv av rayon

Art.nr.	Stl Ø mm	Utvikt stl. cm	St/AFP	St/TFP	MBA
1410007	30	15 x 15	100	25 x 100 = 2500	TFP
1410003	30	15 x 15	200	18 x 200 = 3600	TFP
1410008	40	20 x 20	100	25 x 100 = 2500	TFP
1410004	40	20 x 20	150	18 x 150 = 2700	TFP
1410005	50	20 x 30	100	18 x 100 = 1800	TFP
1410011	60	30 x 40	75	18 x 75 = 1350	TFP
1410006	65	40 x 40	75	18 x 75 = 1350	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Mjuka tork med hög absorption som används vid allmän sårrengöring och omläggning. Inga kända kontraindikationer.

Bruksanvisning





Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna genom att dra isär påsens zip-förslutning.
2. Använd pincett för att ta ut torken ur påsen.
3. Förslut påsen genast för att återstående tork inte ska kontamineras



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014 (förkortad process)
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDR (EU) 2017/745 klass I (DoC YB-33-01 Gauze swabs&balls&rolls)
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium