

**Skål**  
rund med gradering, 500ml



**Ingående delar/material**

**Skål:** 100% polypropylen  
500 ml - bruksfärdig

**Färg**

Transparent

Produkten innehåller inte PVC.

**Förpackningar**

Innerförpackning IFP  
Avdelningsförpackning AFP  
Transportförpackning TFP

**Material**

medicinskt papper/plast  
kartong  
kartong

**Avfallshantering\***

förbränning/mjukplast  
kartong  
kartong

\*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Volym	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
9158153	500 ml	1	32 x 1 = 32	2 x 32 = 64	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

### Indikation

Skål för uppsamling och mätning av olika vätskor inom operationsverksamhet eller där motsvarande behov finns.

### Bruksanvisning





Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna innerförpackningen genom att dela på flikarna i sidan och ta ut innehållet med sterila handskar.
2. Fyll kärlet med tillämplig vätska och kassera efter användning i enlighet med instruktioner under avfallshantering.



### Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass Is, Notified Body: 0197 TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

### Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till  **FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN**

#### Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd  
Paojiang Industrial Zone  
Shaoxing, Zhejiang  
China

#### Importer:

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)

#### EC-REP:

Obelis S.A.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels  
Belgium