


Skålset stort (4 delar)
med dubbelhäftande tejp

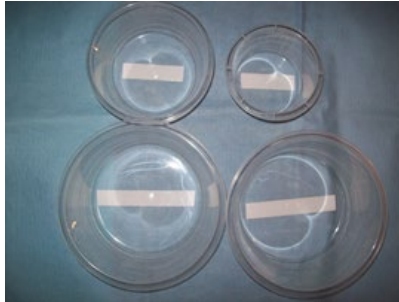

Ingående delar/material

Färg

1 st skål rund å 250 ml
1 st skål rund å 500 ml
2 st skålar runda å 1000 ml

Skålar: 100% polypropylen Transparent

Tejp: Polyuretan film samt skyddspapper av cellulosa

Produkten innehåller inte PVC.

Förpackningar

Innerförpackning IFP
Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

medicinskt papper/plast
kartong
kartong

Avfallshantering*

förbränning/mjukplast
kartong
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
9158167	1	14 x 1 = 14	2 x 14 = 28	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Skål för uppsamling och mätning av olika vätskor inom operationsverksamhet eller där motsvarande behov finns.

Bruksanvisning





Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna innerförpackningen genom att dela på flikarna i sidan och ta ut innehållet med sterila handskar.
2. Under varje skål finns en dubbelhäftande tejprensa som ska förhindra att skålen glider på underlaget.
3. Avlägsna skyddsfilmerna på tejprenorna och tryck skålen mot underlaget.
4. Fyll kärlet med tillämplig vätska och kassera efter användning i enlighet med instruktioner under avfallshantering.


Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Produkt steriliserad i EO enl. ISO 11135:2014
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass Is, Notified Body: 0197 TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad. Innehållet är sterilt om förpackningen är oskadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
[NATURAL LATEX FREE]	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till  **FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN**

Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium