

Skyddsförkläde utan ärm, i påse



Ingående delar/material

Material: 100% Polyeten

Bredd: 80 cm

Längd: 125 cm

Tjocklek

0,02 mm

Färg

Transparent

Förpackningar

Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

PE-påse
kartong

Avfallshantering*

mjukplast
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

| Art.nr. | St/AFP | St/TFP | MBA |
|---------|--------|-----------------|-----|
| 8120 | 100 | 10 x 100 = 1000 | TFP |

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Engångs skyddsförkläde för arbete där risk för mindre stänk av vätskor förekommer.



Bruksanvisning

1. Öppna förpackningen genom att pressa vid perforeringen på askens ovansida.
2. Dra ut ett förkläde och riv av vid perforeringen i plasten.
3. Skaka förklädet för att veckla ut det.
4. Trä öglan i förklädet runt nacken.
5. Använd de långa plastremarna i förklädets sidor för att knyta fästa förklädet runt midjan.
6. Förklädet kan enkelt rivs sönder vid avtagning.
7. Kasseras i enlighet med instruktion under punkten avfallshantering.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

| | |
|---|---|
|  | Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten |
|  | CE-märkt enl. PPE Klass I Regulation (EU)2016/425 |

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

| | |
|---|---|
|  | Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart |
|  | Produkten innehåller inte naturlatex |

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet. Tillverkning sker i Kina.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Ningbo Transo medical CO., LTD
Room 1608, No.18 Diamond commercial plaza, No.409
Jiang'an Road, Jiangbei District
Ningbo 315021 China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se