

## Skyddsförkläde Hermes med lång ärm och tumgrepp



### Ingående delar/material

**Material:** 100% Cast Polyeten (CPE)  
präglad yta

**Bredd:** 98 cm

**Längd:** 125 cm

**Vikt:** 35g/st

### Tjocklek

0,03 mm

### Färg

Ljusblå

### Förpackningar

Innerförpackning IFP  
Avdelningsförpackning AFP  
Transportförpackning TFP

### Material

PE-plast  
PE-plast  
kartong

### Avfallshantering\*

mjukplast  
mjukplast  
kartong

\*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	St/IFP	St/AFP	St/TFP	MBA
8550	1	20 x 1	20 x 5 = 100	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

## Indikation

Engångs skyddsförkläde för arbete där risk för mindre stänk av vätskor kan förekomma.



## Bruksanvisning

1. Öppna förpackningen genom att riva sönder plasten.
2. Lyft ut förklädet.
3. Skaka förklädet för att veckla ut det.
4. Trä öglan i förklädet runt nacken och trä i armarna.
5. Använd de långa plastremarna i förklädets sidor för att knyta fästa förklädet runt midjan.
6. Förklädet kan enkelt rivas sönder vid avtagning.
7. Kasseras i enlighet med instruktion under punkten avfallshantering.



## Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. PPE Klass I Regulation (EU)2016/425

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

## Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet. Tillverkning sker i Kina.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



### Manufacturer:

Ningbo Transo medical CO., LTD  
Room 1608, No.18 Diamond commercial plaza, No.409  
Jiang'an Road, Jiangbei District  
Ningbo 315021 China

### Distributor:

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)