

## Topspinne

15 cm med bomull i en ände



### Ingående delar/material

**Skaft:** Trä, vit björk

**Topp:** 100% bomull. USP Medical grade.

**Storlek:** Längd: 15 cm  
Tjocklek: 2 mm

**Sterilisering:** Produkten kan steriliseras i ångautoklav vid 121°C i 15 minuter eller vid 135°C i 3 minuter enligt standard SS-EN-285. Alternativ steriltid validerad vid 121°C i 20 minuter eller vid 135°C i 7 minuter. Kan även steriliseras i Sterrad (lågtemperatur).

### Förpackningar

Avdelningsförpackning AFP  
Transportförpackning TFP

### Material

påse (PE)  
kartong

### Avfallhantering\*

mjukplast  
kartong

Art.nr.	Längd	St/AFP	St/TFP	MBA
5128101	15 cm	100	100 x 100 = 10000	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

### Indikation

Enklare sårvård samt provtagning.

### Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.




1. Öppna påsen genom att sära på zip-förslutningen. Ta ut en produkt och förslut därefter påsen.
2. Använd produkt kasseras enligt instruktionen under avfallshantering.

Observera att produkten inte bör användas i örat. Används produkten i örat ska proceduren utföras, med yttersta försiktighet, av utbildad personal.



### Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Medicinteknisk produkt
	CE-märkt enl. MDR (EU) 2017/745 klass I
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

### Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



#### Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd  
Paojiang Industrial Zone  
Shaoxing, Zhejiang  
China

#### Importer:

AST Medical AB  
Backa Bergögata 5  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.astmedical.se](http://www.astmedical.se)

#### EC-REP:

Obelis S.A.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels  
Belgium