

Topspinne

15 cm med bomull i en ände



Ingående delar/material

Skaft: Trä, vit björk

Topp: 100% bomull. USP Medical grade.

Storlek: Längd: 15 cm
Tjocklek: 2 mm

Sterilisering: Produkten kan steriliseras i ångautoklav vid 121°C i 15 minuter eller vid 135°C i 3 minuter enligt standard SS-EN-285. Alternativ steriltid validerad vid 121°C i 20 minuter eller vid 135°C i 7 minuter. Kan även steriliseras i Sterrad (lågtemperatur).

Förpackningar

Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

påse (PE)
kartong

Avfallshantering*

mjukplast
kartong

Art.nr.	Längd	St/AFP	St/TFP	MBA
5128101	15 cm	100	100 x 100 = 10000	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

För rengöring av hud och mindre sår.

Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.




1. Öppna påsen genom att sära på zip-förslutningen. Ta ut en produkt och förslut därefter påsen.
2. Använd produkt kasseras enligt instruktionen under avfallshantering.

Observera att produkten inte bör användas i örat. Används produkten i örat ska proceduren utföras, med yttersta försiktighet, av utbildad personal.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Medicinteknisk produkt
	CE-märkt enl. MDR (EU) 2017/745 klass I
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2021

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:
Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:
AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EU REP EU-REP:
Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium