

Tungspatel av trä



Ingående delar/material

Trä: Vit björk

Storlek: Längd: 15 cm
Bredd: 20 mm
Tjocklek: 1,5 mm

Sterilisering: Produkten kan steriliseras i EO eller i ångautoklav vid 121 alt. 135°C

Förpackningar

Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

kartong
kartong

Avfallshantering*

kartong
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Längd	St/AFP	St/TFP	MBA
5118101	15 cm	100	50 x 100 = 5000	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Engångsartikel för undersökning av munhåla och svalg.

Bruksanvisning



Produkten är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal.

1. Öppna asken genom att lyfta på locket. Ta ut en tungspatel och stäng därefter locket.
2. Tungspatel placeras försiktigt mot tungan för att förbättra sikten vid undersökning av munhåla och svalg.
3. Använd produkt kasseras enligt instruktionen under avfallshantering.



Lagring och hållbarhetstid

Förvaras på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	CE-märkt enl. MDD 93/42/ECC klass I

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2016

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang
China

Importer:

AST Medical AB
Backa Bergö gata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC-REP:

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium